

## Väggmontering

Gör två hål i väggen på 101 mm avstånd (se illustration på framsidan av denna Bruksanvisning). Skruva in skruvarna (och ev. plugg).

**OBS!** Skruva inte ända in, lämna ett avstånd på 6-7 mm från väggen.

Häng upp telefonsignalsindikatorn på skruvhuvudena och dra apparaten nedåt för att säkra upphängningen.

## Återförsäljare



Vid handhavande frågor, vänligen kontakta i första hand det ställe där Du köpt produkten.

Bo EDIN AB utvecklar, tillverkar och säljer trådlösa slingsystem och hörseltekniska hjälpmedel. Företaget grundades 1965 och i dag består produktsortimentet av både egenutvecklade produkter (Univox) och produkter från andra företag. För att säkerställa en hög kvalitet genomgår alla produkter noggranna tester. Ca hälften av försäljningen går på export.

### Bo EDIN AB

Stockby Hantverksby 3  
181 75 LIDINGÖ

#### Gatuadress:

Förrådsvägen 2 B  
181 41 LIDINGÖ

#### Telefon:

08-767 18 18

#### Telefax:

08-767 18 20

#### E-post:

info@edin.se

#### Hemsida:

www.edin.se

Z:\Products Public\Telephones\CL1\Swedish\Service\CL1\_bruksanvisning\_ver2\_revA.pmd sept. 2003



CL1


## Telefonsignalsindikator

## Bruksanvisning


### Innehållsförteckning

- Översikt ..... sid 1
- Ansluta telefonsignalsindikatorn ..... sid 2
- Väggmontering ..... sid 4
- Ställa in signaler ..... sid 3
- Ställa in volym och ton ..... sid 3
- Tillbehör ..... sid 3

## CL1 ÖVERSIKT

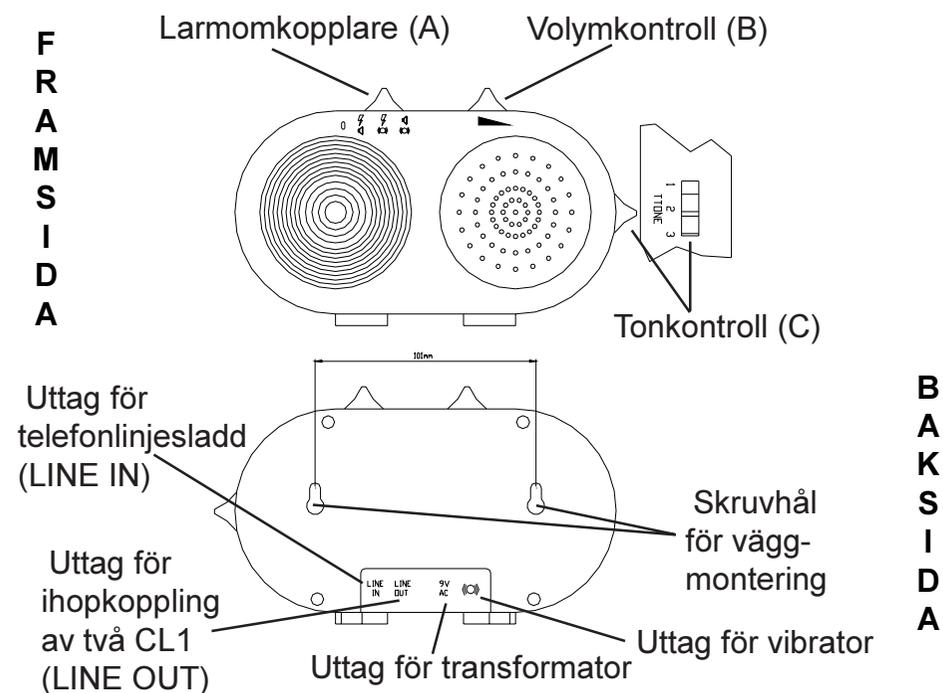

BAKSIDA

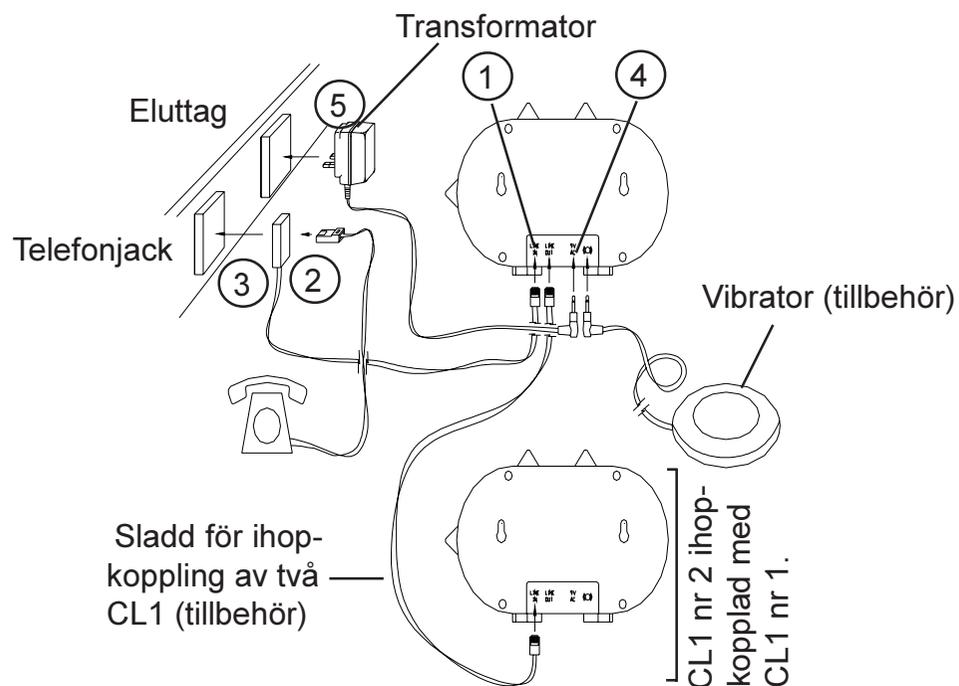

1. Anslut medföljande telefonlinjesladd till telefonsignalsindikatorn (line IN).
2. Anslut andra änden av telefonlinjesladden till medföljande dubbelplugg. Anslut telefonens plugg i dubbelpluggen.  
**OBS!** Om Din telefonplugg har 5 st stift måste Du bryta av mittenstiftet (plaststiftet), såsom det är gjort på dubbelpluggen som följer med telefonsignalsindikatorn. Detta görs enkelt med en avbitarång. Om stiftet ej tas bort blockeras telefonen.
3. Anslut dubbelpluggen till telefonjacket.
4. Anslut transformatorn till telefonsignalsindikatorn.
5. Anslut transformatorn till eluttag.

### Ställa in signaler

Du kan välja vilken/vilka signalinställningar Du vill ha genom att flytta larmomkopplaren (A) till en av följande positioner:

- 0 Ingen signal
- 1 Blixt- och ljudsignal
- 2 Blixt och vibrator (tillbehör)
- 3 Ljudsignal och vibrator (tillbehör)

### Ställa in volym

Ställ in volymkontrollen (B) på önskad nivå.

### Ställa in ton

Ställ in tonkontrollen (C) på önskad nivå (3 lägen).

## CL1 TILLBEHÖR

### Vibrator

Telefonsignalsindikatorn kan kompletteras med en vibrator. När det ringer aktiveras vibratoren automatiskt.

### Sladd för ihopkoppling av två CL1

Telefonsignalsindikatorn kan kompletteras med en extra sladd om Du vill koppla ihop två CL1.

**TEKNISK INFORMATION:** För teknisk information och gällande deklarerationer hänvisar vi till den engelska bruksanvisningen.

